



## DioFog-Controller Rücksendung

04.02.2019/cw

### Wohin sollen die DioFog-Controller nach erfolgter Raumvernebelung mit dem DiosolGenerator versendet werden?

Nach dem Desinfektionsvorgang mit dem DiosolGenerator:

1. Alle ausgelegten DioFog-Controller wieder einsammeln und in den verschließbaren Plastikbeutel legen
2. Sicherstellen, dass folgende Dokumentationspapiere ausgefüllt wurden
  - a. Das Papier „**Hygienische Umgebungsuntersuchungen**“ an den farblich markierten Stellen
  - b. Das Papier „**Labor-Rücksendeschein**“ an den farblich markierten Stellen
3. Ausgefüllte Papiere, Beutel mit DioFog-Controllern und Beutel mit der Transportkontrolle an folgende Adresse versenden:

**MEDUCOMP GmbH**  
Am Müggelpark 23  
D-15537 Gosen Neu-Zittau

#### Achtung!

Der DioFog-Controller ist aufgrund der veränderbaren Empfindlichkeit der eingesetzten Testkeime nur begrenzt **- bis ca. 8 Wochen nach Erhalt -** einsatzbereit. DioFog-Controller möglichst kurzfristig nach dem Erhalt einsetzen, längstens jedoch bis zu dem von uns angegebenen Haltbarkeitsdatum.

#### Keimbelastungen

Die Keimbelastungen sind jeweils so in den Keimträger eingebracht, das sich die höchste Dichte:  $10^6$  in der Kammer genau unter der ID-Nr. befindet!

#### Hinweis

Sollte die Laborauswertung negativ ausfallen, d. h. keine ausreichende Desinfektionswirkung nachgewiesen werden, sind sofort geeignete Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu ergreifen. Nach der Störungsbeseitigung durch Fachpersonal, ist eine erneute Kontrolle durchzuführen.